

Nasojet Alto Fluxo

Pó para preparo de solução de cloreto de sódio a 0,9% para lavagem da cavidade nasal
Lavagem Nasal

Pó para preparo de solução de cloreto de sódio a 0,9% para lavagem da cavidade nasal

Lavagem Nasal

uso nasal

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Contém 30 envelopes com 2,16g cada, acompanhados com um frasco aplicador de 240mL

COMPOSIÇÃO: Cada envelope de **NASOJET ALTO FLUXO** contém: 2,16g de cloreto de sódio na forma de pó para preparo de solução de cloreto de sódio 9mg/mL (concentração final na solução após reconstituição com água purificada ou fervida).

INDICAÇÕES: **NASOJET ALTO FLUXO** tem como indicação a lavagem nasal. O **NASOJET ALTO FLUXO** auxilia na higienização das fossas nasais. Contribuindo para a remoção mecânica de muco, secreções e partículas aderidas à mucosa nasal, favorecendo a manutenção da permeabilidade nasal e a melhora do conforto respiratório. Uso único.

CONTRAINDIÇÕES: **NASOJET ALTO FLUXO** é contraindicado para usuários com antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

O frasco aplicador é de uso individual, ou seja, deve ser utilizado apenas por um paciente, a fim de evitar a transmissão de doenças.

No caso de dúvidas sobre o procedimento de uso, procure um profissional da saúde.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: **NASOJET ALTO FLUXO** não deve ser utilizado se o pó mudar de coloração ou empedrar. O uso do produto é exclusivamente externo. Não ingerir a solução. Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso na embalagem. Não usar o produto **NASOJET ALTO FLUXO** se a embalagem apresentar evidências de adulteração. Interrompa o uso no caso de aparecimento de reações indesejáveis como dor nas narinas, vermelhidão ou irritação contínua, em caso de piora dos sintomas ou se a condição persistir, procure orientação médica especializada.

Manter fora do alcance de crianças.

Recomenda-se a substituição do frasco aplicador a cada 03 meses.

MODO DE USO

Uso externo.

Uso nasal.

Uso adulto e pediátrico.

Fazer a irrigação nasal de 3 a 4 vezes ao dia ou a critério médico utilizando o frasco aplicador.

Lavar o frasco com água corrente e sabão neutro antes do primeiro uso, e após cada utilização.

Após preparo, a solução deve ser utilizada por completo e não deve ser armazenada.

O uso em crianças deve ser feito com o auxílio de um adulto.

Instruções de uso:

1. Preparação da solução nasal

Dilua o conteúdo de um envelope em 240mL de água filtrada ou fervida em temperatura ambiente dentro do frasco aplicador. Todo o conteúdo do envelope deverá ser solubilizado por completo na água.

Feche o frasco firmemente, garantindo que não haja vazamento do produto. O volume de 240 mL do produto deverá ser dividido para a utilização em ambas as narinas.



2. Posição para lavagem nasal

Incline o corpo levemente para frente sobre uma pia. Insira o bico do frasco na narina voltada para cima sem pressioná-lo contra o nariz, para evitar ferimentos. Mantenha a boca aberta e respire pela boca. Essa manobra, promove o vedamento entre as cavidades oral e nasal, permitindo que a solução percorra corretamente a via nasal.



3. Aplicação da solução nasal

Aperte o frasco até que a solução flua da narina inclinada para a oposta. Ao final, expire vigorosamente pelas narinas para limpar o excesso de solução e o muco. Repita o procedimento para a outra narina.

Após a realização do procedimento para ambas as narinas, realize a lavagem do frasco aplicador.



4. Lavagem e desinfecção do frasco aplicador



Antes do primeiro uso, recomenda-se a higienização do frasco aplicador com água corrente e sabão neutro, lavando separadamente cada uma de suas partes. Após a lavagem, o frasco deve ser devidamente enxaguado e deixado para secagem completa em local limpo e arejado. Após a secagem, remonte o dispositivo, e prossiga com o procedimento de lavagem nasal conforme modo de uso.

Após procedimento de lavagem nasal, desmonte o dispositivo e lave separadamente cada uma de suas partes com água corrente e sabão neutro. Em seguida, enxágue adequadamente e deixe para secagem completa em local limpo e arejado. Após a secagem, remonte o dispositivo e armazená-lo em local protegido do calor, da luz e da umidade, até o próximo uso.

Recomenda-se a substituição do frasco aplicador a cada 03 meses.

Conservar em temperatura ambiente de 15°C a 30°C. Proteger da umidade.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure um profissional de saúde.

Registro ANVISA nº: 8.325943.XXXX.

Fabricante e Detentor do Registro:

Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira
Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312
CNPJ 02.456.955/0001-83

Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Cristiano Alves França
CRF/BA 7573